

アキュチェックモバイル 取扱説明書一部改訂
(130ページ 14 メッセージと問題 E-3)

改訂後	改訂前
<div data-bbox="235 461 418 700" style="background-color: black; color: white; padding: 5px;"> <p>測定器エラー： 再度測定 してください</p> <p>(E-3)</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ 血糖値が低すぎる可能性があります。 <div data-bbox="456 546 821 668" style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> <p>すみやかに医師の指示に従って、適切な処置をとってください。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ 測定器に問題があります。 <div data-bbox="456 730 821 950" style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> <p>測定器の電源を入れ直してもエラーメッセージが表示される場合は、「ロシュにハローお客様センター」(ページ1を参照)にお問い合わせください。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ 以下の操作を行った可能性があります。 <p style="margin-left: 20px;">手を洗わずに測定した</p> <p style="margin-left: 20px;">血液が球状でなく、広がった血液を使用した</p> <p style="margin-left: 20px;">測定エリアに指を強く押しつけた</p> <p style="margin-left: 20px;">血液を測定エリアへこするようにつけた</p> <p style="margin-left: 20px;">血液をつける時にテープがずれた(動いた)</p> <p style="margin-left: 20px;">血液をつける時に機器、または指を揺らした</p> <p style="margin-left: 20px;">ピーという確認音が鳴り、「測定中」が表示されても指をつけ続けた</p> <div data-bbox="456 1662 821 1988" style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> <p>以上の操作がなかったかご確認頂き「正しい測定操作法」を参照のうえ再度測定をしてください。再度測定を行ってもエラーメッセージが表示される場合は、「ロシュにハローお客様センター」(ページ1を参照)にお問い合わせください。</p> </div>	<div data-bbox="935 461 1118 700" style="background-color: black; color: white; padding: 5px;"> <p>測定器エラー： 再度測定 してください</p> <p>(E-3)</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ 血糖値が低すぎる可能性があります。 <div data-bbox="1154 546 1520 668" style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> <p>すみやかに医師の指示に従って、適切な処置をとってください。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ 測定器に問題があります。 <div data-bbox="1154 730 1520 950" style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> <p>測定器の電源を入れ直してもエラーメッセージが表示される場合は、「ロシュにハローお客様センター」(ページ1を参照)にお問い合わせください。</p> </div>